

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XÔNG KHÍ DUNG

MODEL: Comfort 3000 KU-500
Hãng sản xuất: Shinei / Nhật Bản

VPDD NIPON CORPORATION TẠI TP.HCM
24 PHAN ĐĂNG LƯU, Q.BT, TPHCM
ĐT: 0283.8448172 FAX: 0283.9971661

I./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :

1. Tháo các khớp nối để đưa nước và thuốc vào máy dễ dàng
2. Đổ nước vào lồng trong máy sao cho phao nổi lên hết cỡ
3. Đưa thuốc vào cốc đựng thuốc, đặt lên trên lồng chứa nước
4. Gài chặt các khớp sao cho hệ thống được kín
5. Bật nút nguồn để mở máy
6. Chỗ **TIMER**: bấm mũi tên lên xuống để chọn thời gian xông khí dung.
Nhấn nút **CONTIN** thì máy sẽ xông liên tục đến khi được tắt
7. Chỗ **NEBULIZATION VOLUME**: chọn mũi tên lên xuống để chỉnh năng lượng xông khí dung
8. Chỗ **AIR-FLOW VOLUME**: chọn mũi tên lên xuống để chỉnh sức gió xông khí dung
9. Nhấn nút **START / STOP** để bắt đầu hoặc kết thúc việc xông khí dung

II./ CÁC BÁO LỖI THƯỜNG GẶP

ERROR: WATER TEMP.HIGH

Nguyên Nhân :trong quá trình hoạt động nước nóng lên → máy ngừng hoạt động

Giải Quyết : thay nước mới

ERROR: WATER LEVEL

Nguyên Nhân : Không đủ nước khi hoạt động

Giải Quyết : Ta cho nước vào lồng trong máy cho đến khi phao không thể dãn lên cao được nữa

CAUTION: WATER TEMP.LOW : Cảnh báo nhiệt độ nước thấp

III./ VỆ SINH

Trong quá trình sử dụng có nhiều bụi bám ở **AIR FILTER, FAN, FILTER DOOR** ta phải mở ra thường xuyên và làm vệ sinh

